
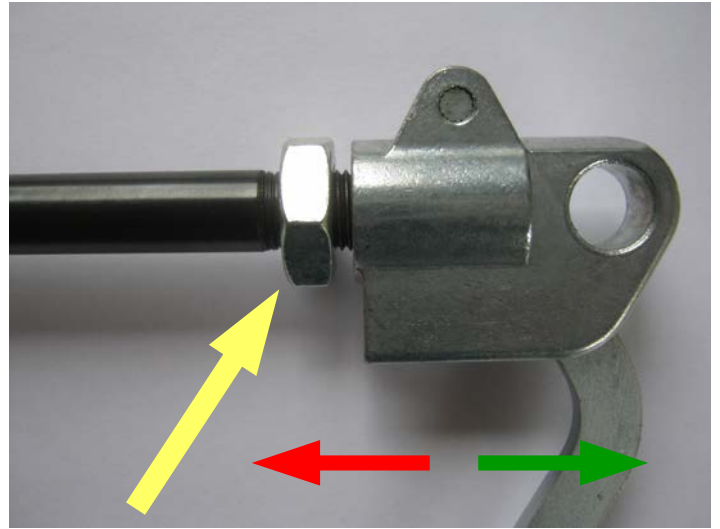


Divina 2K+

Fußgasfeder einstellen

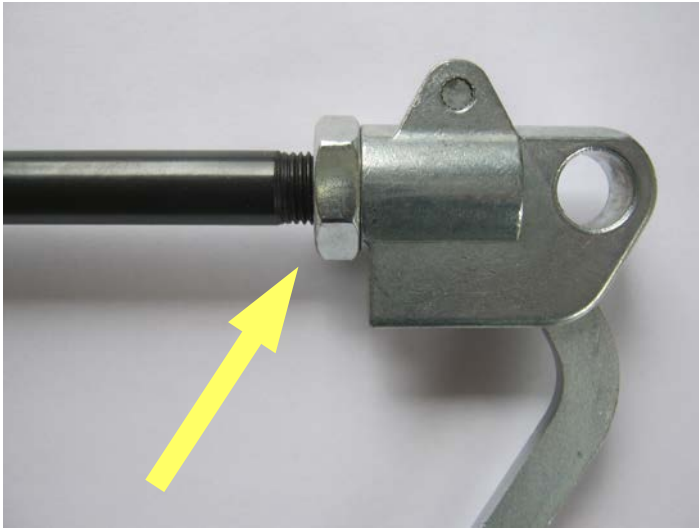

Einstellungsmöglichkeiten:

1. Wenn die Fußgasfeder sich von selber langsam absenkt

- => Bitte öffnen Sie die Feststellmutter wie auf dem Bild angegeben (gelber Pfeil)
- => Drehen Sie den Hebelkopf gegen die Uhrzeigerrichtung um eine halbe oder ganze Umdrehung.
- => Bitte schrauben Sie die Feststellmutter wieder fest.
- => Bauen Sie die Fußgasfeder wieder ein und überprüfen Sie ob alles wieder funktioniert. Ansonsten wiederholen Sie bitte den Vorgang nochmal bis die Fußgasfeder wieder normal arbeitet.

2. Wenn die Fußgasfeder sich nicht verstellen lässt

- => Bitte öffnen Sie die Feststellmutter wie auf dem Bild angegeben (gelber Pfeil)
- => Drehen Sie den Hebelkopf in die Uhrzeigerrichtung um eine halbe oder ganze Umdrehung.
- => Bitte schrauben Sie die Feststellmutter wieder fest.
- => Bauen Sie die Fußgasfeder wieder ein und überprüfen Sie ob alles wieder funktioniert. Ansonsten wiederholen Sie bitte den Vorgang nochmal bis die Fußgasfeder wieder normal arbeitet.

Mit freundlichen Grüßen

Cosmoderm Reichert GmbH