


Information für Kunden


Netzausfallerkennung bei D3M Steuerung 24.012.100 (schwarzes Gehäuse)

Diese Steuerung hat einen Resetzwang. Die Steuerung fällt aus, wenn während des Betriebes der Liege (Motor läuft) der Strom ausfällt. In diesem Falle piepst der Handschalter, wenn man auf die Tasten drückt – die Motoren funktionieren nicht.

Was ist zu tun?

Auf Taste Einstiegsposition  solange drücken, bis Liege in Einstiegsposition gefahren ist und 2xPiepton zu hören ist.
Alle Motoren müssen in die Endstellung fahren, damit der Reset gelingt.

Zählerstand der Motoren auf NULL setzen

Wenn sich die gespeicherten Positionen von selbst verändert haben, sollten sie durch 3x drücken der „S“ Taste und 5 Sek. drücken der  Taste den Zählerstand auf NULL setzen.

HINWEIS bei Infrarot-Handschalter:

Bei Infrarot-Handschalter gibt es **keine** Resetmöglichkeit.
Hierfür verwenden Sie den Handschalter mit Kabel.

Bitte **Kabel des Infrarot-Empfängers** an der Steuerung ziehen und Handschalter-Kabel einstecken. Jetzt bitte wie unter „Was ist zu tun „ verfahren.

Kindersicherung bei D3M

Steuerung 24.012.100 (schwarzes Gehäuse)

Zusätzlich hat diese Steuerung noch eine **Kindersicherung**.

Diese wird aktiviert, wenn die Taste S ca. 10 Sekunden gedrückt wird bis 2xPiepton zu hören ist.

Der Handschalter piepst, wenn die Tasten gedrückt werden.

Die **Deaktivierung** der Kindersicherung geschieht ebenfalls durch Drücken der S-Taste für ca. 10 Sekunden bis 1xPiepton zu hören ist. Danach ist die Kindersicherung aufgehoben.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an unter 07244-77 03 50.

Ihr Cosmoderm-Team

