

Funkhandschalter an die Steuerung (V-Mat) einlernen

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Liege aus der Steckdose und warten Sie ca. 2 Minute.



2. Drücken Sie bitte beide Pfeiltasten gleichzeitig für ca. 2 Sekunden. Nach dem Loslassen müsste die LED für ca. 20 Sekunden blinken.
3. Verbinden Sie innerhalb dieser Zeit den Netzstecker der Liege mit der Steckdose.



Bei einer erfolgreichen Anbindung hören Sie einen Piepton. Der Funkhandschalter kann nun verwendet werden.



Ertönt kein Signalton (piepen), dann ist das Einlernen fehlgeschlagen. Bitte wiederholen Sie den gesamten Vorgang ab Punkt 1.



Um eine klare Zuordnung zu gewährleisten sollten Sie immer nur eine Liege einlernen.